

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер призначений для очищення, зволоження та зменшення набряку носових порожнин. Усуває накопичений слиз, зволожує слизові оболонки носу та робить дихання вільним.

**Атомер спрей 150 мл,
Атомер бебі спрей 100 мл,
Атомер міні спрей 35 мл**

Склад. Стерильний ізотонічний розчин морської води. Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо.

Атомер рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціювання повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожную ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день.

Розпилювач Атомер бебі спрей спеціально розроблений для дітей. Маленький наконечник, що обертається, дозволяє використовувати засіб в будь-якому положенні дитини, що усуває ризик пошкодження слизової оболонки носа.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Переваги Атомер:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

ВИРОБНИК:

PHARMACOSMETIC-DIAFARM STERGIOULAS STYLIANOS & Co L.P. 14th km Thessaloniki-Poligiros N.R., Thermi, Thessaloniki, Greece, P.C.57001 P.O. BOX 60294 / Tel: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr /

www.athomer.com ФАРМАКОСМЕТІК-ДІАФАРМ СТЕРЖДІОУЛАС СТІЛІАНОС & Ко Л.П. 14-й км
Тессалонікі-Полігірос Н.Р., Термі, Тессалонікі, Греція, індекс 57001, п/с 60294 / Тел.: +30 2310 486
320, bioplant@otenet.gr / www.athomer.com
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ «МІТЕК, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 16. Тел.:
044 495 29 29, mitek@mitek.kiev.ua / www.mitek.kiev.ua

Дата останнього перегляду 10.02.2020