

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню виробу медичного призначення
Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти
GYNODEK (ГІНОДЕК)

Опис

GYNODEK (ГІНОДЕК) - вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота. Гель має однорідну, в'язку консистенцію, без запаху.

Склад:

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 0,5%, 5 мл у контейнері полімерному, містить:

Декаметоксин	1,0 мг
Гіалуронат натрію	25,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 5,0 мл

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 1,0%, 5 мл у контейнері полімерному, містить:

Декаметоксин	1,0 мг
Гіалуронат натрію	50,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 5,0 мл

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 1,5%, 5мл у контейнері полімерному, об'ємом 5 мл містить:

Декаметоксин	1,0 мг
Гіалуронат натрію	75,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 5,0 мл

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 0,5%, 10 мл у контейнері полімерному, містить:

Декаметоксин	2,0 мг
Гіалуронат натрію	100,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 10,0 мл

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 1,0%, 10 мл у контейнері полімерному, містить:

Декаметоксин	2,0 мг
Гіалуронат натрію	150,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 10,0 мл

Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 1,5%, 10 мл у шприці попередньо наповненому містить:

Декаметоксин	2,0 мг
Гіалуронат натрію	150,0 мг
Лактатний буфер рН 3,8-4,5.....	до 10,0 мл

Показання

- Інфекційно-запальні захворювання статевих органів.
- Профілактика інфекційно - запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним втручанням, малих діагностичних операціях, перед пологами, штучним перериванням вагітності, до та після встановлення ВМС).
- Стани, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви (дистрофічні зміни слизової оболонки у постменопаузний період, подразнення, печіння, свербіж внаслідок частих спринцювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, прийому антибіотиків, гормонів, контрацептивів).
- Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час природних пологів.
- При передчасних пологах, після розриву амніотичного мішка.
- Профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Механізм дії

GYNODEK (ГІНОДЕК) – вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота. Гель підтримує рН та вологість слизової піхви, завдяки чому допомагає формувати нормальну мікрофлору, захищає від різних інфекцій, усуває дискомфорт та сухість в статевих органах.

Декаметоксин чинить антимікробну, протигрибкову дію та концентрується на цитоплазматичній мембрані (ЦПМ) мікробної клітини і з'єднується з фосфатидними групами ліпідів мембран, порушуючи проникність ЦПМ мікроорганізмів. Декаметоксин високоактивний відносно мікроорганізмів стійких до антибіотиків. Декаметоксин не всмоктується слизовими оболонками, неушкодженою шкірою та рановою поверхнею.

Гіалуронова кислота має властивість зв'язувати воду, чим забезпечує підтримку вологості в слизовій оболонці піхви, проявляє регенеруючі та ранозагоювальні властивості, а також покращує відновлюючі процеси в слизовій оболонці піхви.

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів, що входять до складу гелю.

Спосіб застосування та дози

Тільки для інтравагінального застосування!

Контейнер полімерний містить 8мл або 13мл гелю (в залежності від об'єму контейнеру), із яких приблизно 5мл або 10мл відповідно потрапляють в піхву під час введення.

Рекомендована доза при станах, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви та інфекційно-запальних захворюваннях статевих органів становить 5 мл 1-2 рази на добу, курс лікування – 7-10 днів.

Для профілактики інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології рекомендована доза становить 5мл.

Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час природних пологів, при передчасних пологах, після розриву амніотичного мішка рекомендована доза становить 5 – 30 мл. Гель вводять під час вагінальних обстежень під час пологів, починаючи з першого вагінального обстеження. При кожному вагінальному обстеженні необхідно нанести 3-5 мл гелю на стерильну рукавичку і рівномірно розподілити цю кількість по родовим шляхам. Для кращого нанесення можна використовувати вагінальний аплікатор. Додаткове введення гелю слід проводити через 15-30 хвилин після розриву амніотичного мішка. Кількість, необхідна для одних пологів, в середньому становить від 10 до 30 мл гелю.

Для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, рекомендується застосовувати 5мл гелю не більше ніж через 2 години після незахищеного полового акту.

Контейнер полімерний

1. Повернути пломбу проти часової стрілки та видалити її.
2. Наконечник контейнера ввести в положенні сидячи або лежачи якомога глибше в піхву.
3. Видавити вміст контейнера в піхву.

Допускається залишок невеликої кількості гелю в контейнері полімерному після використання.

Побічні реакції

У разі виникнення подразнення піхви, припиніть використання та зверніться до лікаря.

Належні заходи безпеки при застосуванні

При застосуванні GYNODEK (ГІНОДЕК) зовнішній туалет піхви можна проводити за допомогою чистої води без застосування мила.

Перевіряйте термін придатності та цілісність упаковки перед використанням.

Не використовуйте виріб, якщо минув термін придатності або пошкоджена упаковка.

При вагітності та годуванні груддю перед застосування проконсультуйтеся з вашим лікарем.

Не слід застосовувати, як засіб контрацепції.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 30°C. Не заморозувати.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-Фарм» Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10Т/ф +3(044) 275-92-42 на заводі: ТОВ «Юрія-Фарм» Україна 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108.