



Мастрелле Флора Плюс

Mastrelle®Flora Plus vaginal capsules

Медичний виріб  вагінальні капсули

Інструкція для застосування

Перешкоджає росту патогенних мікроорганізмів

Запобігає дисбалансу вагінальної флори при лікуванні антибіотиками
Знімає біль, подразнення, свербіж та печіння
Відновлює баланс рН піхви після менструації

Уважно прочитайте інструкцію для застосування перед використанням вагінальних капсул Мастрелле флора плюс, навіть якщо ви вже використовували цей медичний виріб раніше. Інформація могла змінитися відповідно до нових досліджень та висновків з моменту, коли ви востаннє відкривали упаковку. Цей медичний виріб відпускається без рецепта лікаря, проте, для досягнення найкращих результатів слід з обережністю використовувати вагінальні капсули Мастрелле флора плюс. Збережіть цю інструкцію для застосування; можливо, вам доведеться звернутися до неї повторно.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ВИРІБ.

Здорова вагінальна флора складається (на 50-90%) в основному з паличок Дедерлейна, до складу яких входять різні штами лактобактерій. На поверхні слизової оболонки піхви лактобактерії утворюють біоплівку, яка захищає піхву від патогенних мікроорганізмів. Коли кількість лактобактерій зменшена або вони відсутні, може спостерігатися надмірне зростання кількості інших мікроорганізмів, що може викликати такі розлади, як бактеріальний вагініт або грибок вагініт (відомий як кандидоз).

Мастрелле Флора плюс, вагінальні капсули - це продукт на основі активного пребіотичного комплексу - олігосахариду, вітамінів та гіалуронової кислоти. Завдяки своєму комплексному складу **Мастрелле Флора плюс** знижує та зрівноважує рН піхви до фізіологічного значення (рН <4,5). Пребіотичний комплекс забезпечує поживні речовини, які стимулюють ріст лактобацил та відновлюють захисну біоплівку, що запобігає зростанню кількості патогенних бактерій і грибів, подібних до Candida. Вітамін Е і гіалуронова кислота утворюють плівку зі зволожуючими та регенеруючими властивостями, що запобігає свербіж, подразненню та печінню.

Склад:

Біологічно активний пребіотичний комплекс – олігосахарид – 100 мг (mg), вітамін С – 50 мг (mg), вітамін Е – 20 мг (mg), гіалуронат натрію – 5 мг (mg), ксиліт – 37,5 мг (mg), лактоза – 467,5 мг (mg);
капсула: гіпромелоза – 100 мг (mg), діоксид титану – 3 мг (mg).

Призначений до використання:

- підтримуюча терапія при лікуванні бактеріального вагініту та кандидозу піхви: одна вагінальна капсула на день (перед сном), протягом 7-10 днів;
- профілактика рецидивуючих бактеріальних інфекцій: одна вагінальна капсула кожні 3 дні (перед сном);
- профілактика дисбалансу мікрофлори піхви під час лікування антибіотиками: одна вагінальна капсула на день протягом усього курсу лікування антибіотиками та після закінчення лікування по одній капсулі ще 7 днів;
- підтримання балансу рН та вагінальної флори в якості профілактичного заходу: одна вагінальна капсула на тиждень;
- поліпшення симптомів, що проявляються в разі постменопаузального атрофічного вагініту: одна вагінальна капсула кожні 3 дні;
- відновлення балансу рН піхви в разі гормонального дисбалансу, що виникає в результаті застосування оральних контрацептивів, під час лактації або під час стресових періодів: одна вагінальна капсула на тиждень;
- відновлення балансу рН піхви після менструального циклу або після незахищеного статевих контакту: одна вагінальна капсула на день протягом двох днів, після кожної менструації або після кожного незахищеного статевих контакту;
- профілактика вагінальних інфекцій після басейну або джакузі: одна вагінальна капсула після кожного відвідування басейну або джакузі.

Спосіб використання.

Тільки для вагінального застосування.

Вимийте руки перед використанням вагінальних капсул **Мастрелле Флора плюс**. Вільною рукою розсуньте статеві губи і обережно введіть капсулу в піхву якомога глибше. (Див. ілюстрацію)



Мастрелле

Флора Плюс

Медичний виріб  **Мастрелле Флора Плюс, вагінальні капсули**

Вагінальні капсули **Мастрелле Флора плюс** потребують вологого внутрішньовагінального середовища для повного розчинення. У разі надзвичайно сухої слизової оболонки піхви капсули слід зволожити водою протягом декількох секунд перед введенням.

Протипоказання.

Застосування вагінальних капсул **Мастрелле Флора плюс** протипоказане у разі підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів медичного виробу.

Особливі вказівки та запобіжні заходи при використанні.

Мастрелле Флора плюс має здатність окислювати вагінальне середовище, в той час як сперма є залужнюючим агентом.

Використання **Мастрелле Флора плюс** може знизити активність сперматозоїдів. Тому, якщо ви хочете завагітніти, не слід застосовувати **Мастрелле Флора плюс** після статевого акту. **Мастрелле Флора плюс** не можна використовувати для контрацепції.

Не використовуйте **Мастрелле Флора плюс** з дезінфікуючими препаратами на основі четвертинних солей амонію, таких як хлорид амонію, тому що гіалуронова кислота осідає в їх присутності.



Умови зберігання:

Зберігайте при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.



Термін придатності: 3 роки.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка:

По 10 вагінальних капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.

Не викидайте порожню упаковку в оточуюче середовище.

Вага нетто:  7,8 г (g)



Виробник:

ФІТЕРМАН ФАРМА С.Р.Л.

ДіДжей 249Е Км 0900,

Томесті Віледж, Томесті Коммун,

Ясси, 707515, Румунія

Тел. : +40 232 252 800

Пояснення символів, зазначених на упаковці

Символи	Значення	Символи	Значення
	Застереження!		Виробник
	Номер партії (серії)		Використати до
	Ознайомтесь із інструкцією для застосування		Зберігати при температурі не вище
	Можлива вторинна переробка пакувального матеріалу		Знак Європейської відповідності
	Знак відповідності технічним регламентам		Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО
	Можливість утилізації використаної упаковки		Зберігай навколишнє середовище в чистоті

Уповноважений представник в Україні:

ПрАТ «Натурфарм»,
вул. Лісна, 30А, Пуща-Водиця,
04075 Київ, Україна
Тел.: +38 044 401 81 03

**Ексклюзивний представник: Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцарія**

**Дотримуйтесь правил, які викладені в
інструкції для застосування.**

Дата останнього перегляду інструкції для
застосування: 11.02.20 

